




RETHINK. RESPECT. RELIVE.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Appoggiare accuratamente il filtro nella parte interna della mascherina, posizionando il feltro grigio verso l'esterno, la parte bianca verso l'interno.
2. Sovrapporre il coprifiltro, assicurandosi che i quattro passanti per il filtro si inseriscano nei quattro fori all'estremità.
3. Tenendo la mascherina in posizione frontale, afferrare una delle estremità del cordino e infilarla nel primo foro in alto (1a), dall'interno verso l'esterno.
4. Inserire e lasciare scorrere dall'esterno verso l'interno la stessa estremità nel secondo foro (2a).
5. Inserire la stessa estremità del cordino nel foro più basso (3a), dall'interno verso l'esterno. La quantità di cordino da tenere tra il punto 2 e il punto 3 è da regolare in base alla misura desiderata. Può essere regolata anche successivamente.
6. Lasciare che il cordino entri con la sua parte plastificata nell'ultimo foro (4a). Non serviranno nodi.
7. Ripetere la stessa operazione anche per l'altra estremità.
8. Indossare la mascherina e tirare il cordino avanzato per far sì che aderisca bene al volto.
9. Lasciare cadere il cordino sul collo. Sarà così possibile, quando non si indossa la mascherina, tenerla al collo.
10. Per la sostituzione del filtro, allargare i due elementi della mascherina in modo da posizionare il filtro, fino a coprire tutti i fori anteriori.

filtro

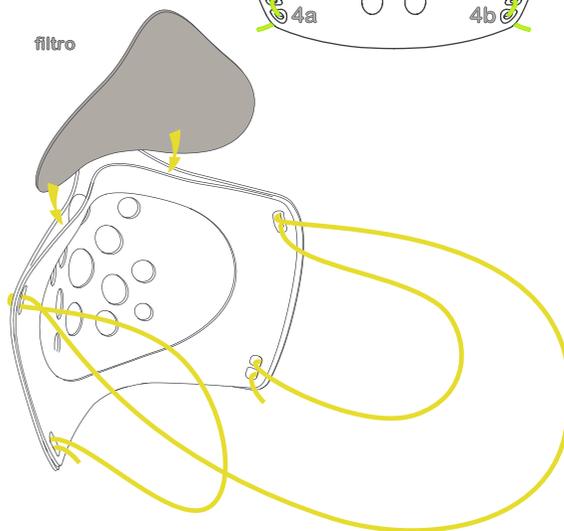

Non è l'unico modo! Scopri tutti su moon3.it o seguici sui nostri social.